

스노우 7 HD

휴대용 독서확대기

사용자 매뉴얼

V.1.1



(주) 네오엑세스

목 차

구성품.....	1
제품 외관.....	2
동작.....	4
충전하기.....	4
전원 켜고 끄기.....	6
확대/축소하기.....	7
색상모드 변경.....	8
화면정지.....	9
필기하기.....	10
버튼음 켜고 끄기.....	11


LED 조명 켜고 끄기	12
화면 밝기 조절	13
TV 나 모니터에 연결하기	14
절전 기능.....	14
설정저장 기능	15
근거리/원거리 보기.....	16
동작 주파수 설정.....	17
문제해결	18
사용상 주의사항	20
제품 규격 및 사양.....	21
고객지원	23

구성품

1. 스노우 7 HD 본체
2. 보관용 파우치
3. 사용자 매뉴얼
4. HDMI 케이블
5. 어댑터
6. 액정클리너

제품 외관



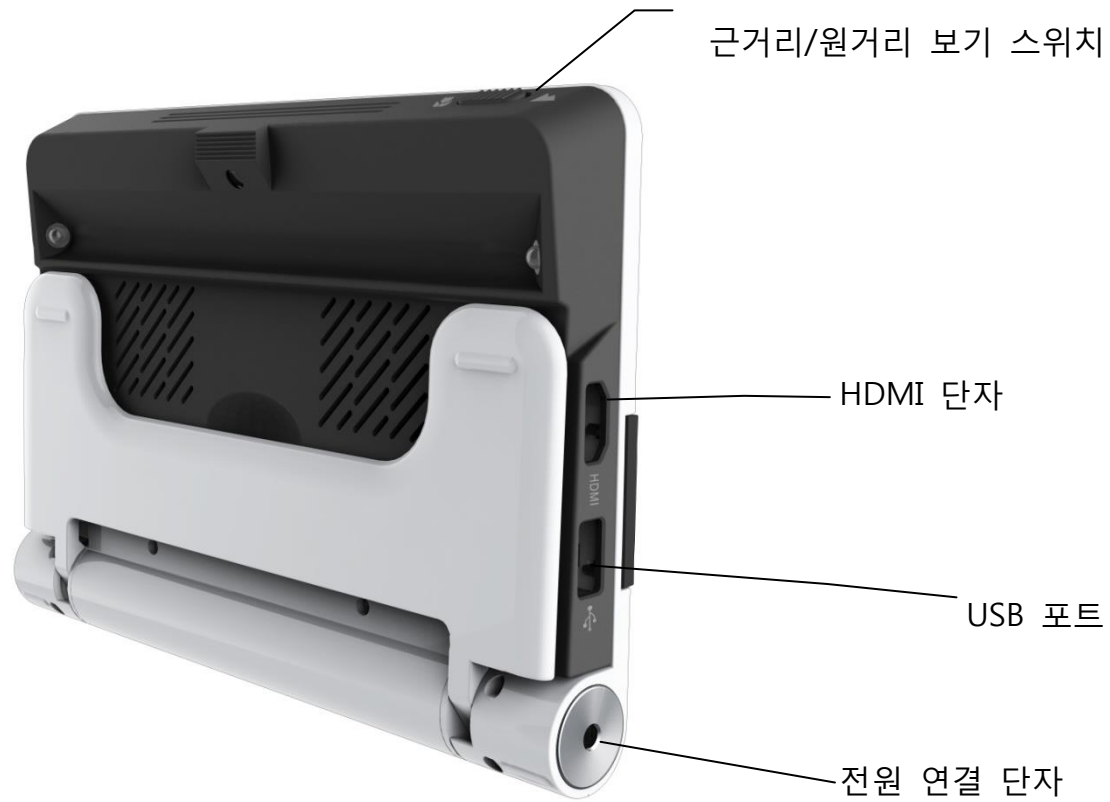

동작

충전하기



- 제품의 최초 사용시에는 완충하시어 사용하기 바랍니다.
- 제공된 어댑터를 사용하여 기기 측면의 전원 연결 단자에 연결하여 충전하시기 바랍니다.
- 충전 중에는 전원 표시등이 빨간색으로 표시되며, 완충 시 전원 표시등이 꺼집니다.
- 배터리 용량표시기가 잔여량이 없는 상태로 표시되어 깜박거리면 충전이 필요합니다.

- 배터리 충전은 약 4~5 시간 가량 소요되며, 완충하여 사용하시는 경우 약 5 시간 연속사용이 가능합니다.

- Notice:**
1. 배터리가 잔여량이 부족한 경우, 빈 배터리 아이콘이 측 하단 모서리에서 5 초 간격으로 깜빡이며 이때는 기기를 충전하시기 바랍니다. 만일, 배터리가 전량 방전될 경우, 화면 중앙에 "Battery Low!!!" 메시지가 나타나 깜빡이다가 자동으로 전원이 꺼집니다. 반드시 적절히 배터리를 충전해 주시기 바랍니다.
 2. 배터리의 수명을 위해 빈 배터리 아이콘이 표시될 때 충전하시기 바랍니다. 반드시 배터리를 완충하여 사용하시기 바랍니다.

전원 켜고 끄기



- 전원 표시등이 녹색으로 표시될 때까지 2 초간 전원 버튼을 누르면 전원이 켜집니다. 전원이 켜지면서 자동으로 독서확대기 모드로 진입합니다.
- 전원 표시등이 꺼질 때까지 2 초간 전원 버튼을 누르면 전원이 꺼집니다.
- 3 분간 아무런 동작이 없는 경우, 자동으로 전원이 꺼집니다.


확대/축소하기



- "+" 버튼을 눌러 확대하고, "-" 버튼을 눌러 축소합니다.
- 스노우 7 HD 의 확대배율은 2.2 배 ~ 16 배입니다.
- 읽으시려는 문서를 기기에서 떨어뜨리시면 확대비율이 떨어집니다. TV 화면에 기기를 연결하시면 확대비율을 높일 수 있습니다.

색상모드 변경

색상모드 버튼

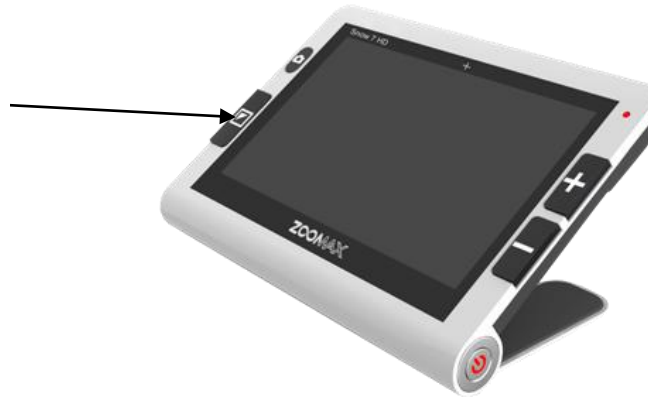

1. 일반 색상모드

일반 색상모드에서 색상모드 버튼을 눌러 12 가지 고대비모드를 선택하실 수 있습니다.

- 컬러모드 - 회색조모드
- 고대비모드: 검정 바탕/하양 글자 - 고대비모드: 하양 바탕/검정 글자
- 고대비모드: 파랑 바탕/하양 글자 - 고대비모드: 하양 바탕/파랑 글자
- 고대비모드: 검정 바탕/노랑 글자 - 고대비모드: 노랑 바탕/검정 글자
- 고대비모드: 노랑 바탕/파랑 글자 - 고대비모드: 파랑 바탕/노랑 글자

- 고대비모드: 검정 바탕/초록 글자 - 고대비모드: 초록 바탕/검정 글자

2. 선호색상모드 보기

- 색상모드 버튼을 2 초간 누르면(컬러모드, 회색조모드 제외) 삐- 소리가 한 번 난 후 선호색상모드 보기로 진입합니다. 컬러모드를 포함하여, 선택한 고대비모드와 그 반대 색상의 고대비모드 3 가지를 지원합니다. (예를 들면, 하양/검정 과 검정/하양 조합)
- 다시 색상모드 버튼을 2 초간 누르면 삐- 소리가 한 번 난 후 일반화면으로 돌아옵니다.

화면정지

화면정지 버튼



- 화면정지 버튼을 눌러 이미지나 글자를 캡처할 수 있습니다.
- 스노우 7 HD 를 인쇄물 위에 올려두고 화면정지 버튼을 누릅니다.
- 정지된 화면을 확대/축소하거나 색상모드를 변경하여 이미지를 더욱 자세히 살펴볼 수 있습니다.
- 화면정지 버튼을 다시 누르면 화면정지가 해제됩니다.

필기하기



- 지지대를 펼칩니다.

- 카메라 아래에 용지를 두고 화면을 보며 필기를 할 수 있습니다.

버튼을 켜고 끄기



축소 버튼을 길게 누름

- 기본설정: 소리 끄
- 소리 켜기: 삐- 소리가 한 번 날 때까지 "-" 축소 버튼을 5 초간 누름
- 소리 끄기: 삐- 소리가 두 번 날 때까지 "-" 축소 버튼을 5 초간 누름

Notice: 소리 켜고 끄기 기능은 최저 배율에서만 설정됩니다.

LED 조명 켜고 끄기

색상모드 버튼



- 기본설정: LED 조명 켜
- LED 조명 끄기: 삐- 소리가 두 번 날 때까지 색상모드 버튼을 5 초간 누름(이 때, 첫 번째 삐-소리와 두 번째 삐- 소리 사이에 약간의 간격이 있음)
- LED 조명 켜기: 삐- 소리가 두 번 날 때까지 색상모드 버튼을 5 초간 누름(이 때, 첫 번째 삐-소리와 두 번째 삐- 소리 사이에 약간의 간격이 있음)

화면 밝기 조절

- 밝기 조절 상자가 나타날 때까지 화면정지 버튼과 확대 버튼을 동시에 누르고, "+" 확대 버튼과 "-" 축소 버튼으로 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 색상모드 버튼을 눌러 설정한 밝기를 저장하고 설정을 빠져나옵니다.; 또는 5 초간 버튼을 누르지 않으면 자동으로 저장 후 설정을 빠져나옵니다.

TV나 모니터에 연결하기



- HDMI 케이블을 스노우 7 HD 와 TV 에 연결하면, 스노우 7 HD 는 자동으로 화면이 꺼지고 HDMI 출력 모드로 전환됩니다.

절전 기능

- 확대기 모드에서 3 분간 아무런 조작이 없으면 자동으로 절전기능이 동작합니다.

설정저장 기능


- 스노우 7 HD 의 전원을 끌 때, 기존에 사용하던 대부분의 설정은 자동 저장됩니다. (예 - 색상모드, 확대비율, 출력형식, 버튼음, 즐겨찾기 모드, 일반 모드). 그러므로 제품 전원을 끄기 전에 사용하시던 설정을 쉽게 다시 이용하실 수 있습니다.

근거리/원거리 보기



근거리/원거리
보기 스위치

(그림 1)

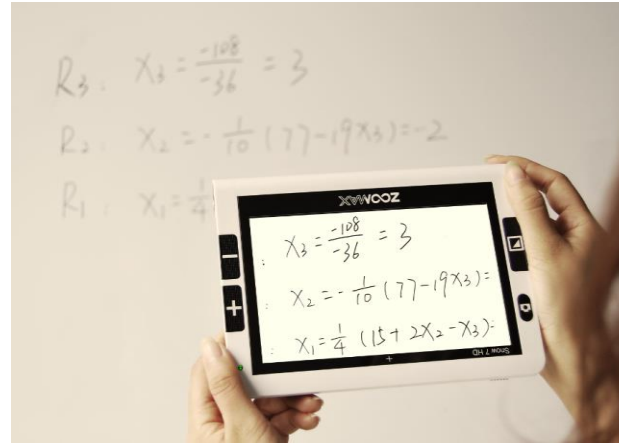

(그림 2)

- 근거리/원거리 보기 스위치는 상단 모서리에 있습니다. (그림 1)
- 스위치를 우측으로 옮기면 근거리 보기 모드 즉, 독서확대기 모드입니다.
- 스위치를 좌측으로 옮기면 원거리 보기 모드입니다.
- 원거리 보기의 경우 화면을 거꾸로 돌려 사용합니다. (그림 2)

동작 주파수 설정

실내에서 사용하는 경우, 몇몇 국가에서는 교류 전원의 영향으로 화면 깜빡거림 현상이 생길 수 있으며, 이는 동작 주파수 설정을 변경하여 해결할 수 있습니다.

- 독서확대기(근거리) 모드에서 화면정지 버튼을 3 초간 눌러 주파수 설정으로 진입합니다. "+" 확대 버튼과 "-" 축소 버튼으로 해당 주파수를 선택하고 색상모드 버튼으로 설정을 완료합니다. 시스템 설정은 자동으로 저장되어 재설정이 필요 없습니다.

문제해결

문제	해결
화면 꺼짐	<ul style="list-style-type: none"> ●전원이 켜있는지 확인하십시오. ●배터리를 충전하십시오. ●확대배율 줄이십시오. ●이미지가 십자선 아래 있는지 확인하십시오.
기기가 켜지지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ●배터리를 충전하십시오
화면상의 이미지가 어둡거나 왜곡됨	<ul style="list-style-type: none"> ●제품과 문서가 평평한지 확인하십시오.
전원 어댑터가 연결되어 있으나 충전되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> ●콘센트에 전기가 흐르는지, 플러그가 깊숙이 꽂혀있는지 확인하십시오.
화면에 얼룩이나 결점이 있음	<ul style="list-style-type: none"> ●카메라와 화면을 클리너로 닦으십시오.
글자가 너무 작게 보임	<ul style="list-style-type: none"> ●적당한 정도로 확대비율을 조정하십시오. ●제공된 HDMI 케이블로 TV 와 연결하여 사용하십시오.
글자가 너무 크게 보임	<ul style="list-style-type: none"> ●적당한 정도로 확대비율을 조정하십시오. ●문서에서 기기를 떨어뜨려보십시오.
기기가 TV 에 연결되었으나	<ul style="list-style-type: none"> ●TV 가 켜있는지 확인하십시오.

<p>TV 화면에 아무것도 표시되지 않음.</p>	<p>●연결 케이블이 적절한지와 출력단자 및 TV 연결단자에 정확히 연결되었는지 확인하십시오.</p>
<p>화면이 멈추거나 왜곡되거나 매뉴얼에 언급되지 않은 문제가 발생함.</p>	<p>●색상모드 버튼과 전원버튼을 길게 눌러 강제종료하고 재시작 하십시오.</p>

만일 위에 언급되지 않은 문제가 발생하는 경우, 구매자에게 문의하시기 바랍니다.

사용상 주의사항

스노우 7 HD 를 안전하게 보관하기 위해 아래 내용을 숙지하시기 바랍니다. :

- 뜨거운 곳이나 직사광선 아래에서 사용하지 마십시오.
- 젖은 곳이나 비, 액체 또는 화학약품과 함께 두지 마십시오.
- 차폐가 잘 되어있지 않은 의료기기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 10°C 이상 40°C 이하의 온도에서 사용하십시오.
- 자가 수리를 위해 케이스를 여는 경우 보증수리를 받을 수 없으니 이를 시도하지 마시고 구매처에 문의하시기 바랍니다.
- 기기를 청소하기 전에는 플러그를 뽑고 보푸라기가 없고 물기가 있는 부드러운 천으로 닦고, 알코올이나 기타 청소용 약품을 이용하지 마십시오.
- 다른 어댑터를 사용하실 경우 제품 손상을 가져올 수 있으니, 반드시 제공된 어댑터를 사용하여 충전하십시오.

제품 규격 및 사양

1. 확대배율: 2.2 배 ~ 16 배
2. 색상모드: 12 가지
 - 컬러모드
 - 회색조모드
 - 고대비모드: 검정 바탕/하양 글자
 - 고대비모드: 하양 바탕/검정 글자
 - 고대비모드: 파랑 바탕/하양 글자
 - 고대비모드: 하양 바탕/파랑 글자
 - 고대비모드: 검정 바탕/노랑 글자
 - 고대비모드: 노랑 바탕/검정 글자
 - 고대비모드: 노랑 바탕/파랑 글자
 - 고대비모드: 파랑 바탕/노랑 글자
 - 고대비모드: 검정 바탕/초록 글자
 - 고대비모드: 초록 바탕/검정 글자
3. 화면: 7 인치 TFT HD
4. 카메라: 오토 포커스; 500 만 화소
5. 연속 확대: 적합한 확대배율 선택가능

6. 촬영거리: 6.5cm ~ 5.0m
7. 기능: 화면정지; 색상모드; 확대/축소
8. 전원 종료 시, 설정 저장
9. 절전기능: 3 분간 아무런 조작이 없으면 자동으로 꺼짐
10. TV/모니터에 연결 가능
11. 전원: 입력: 110—240V; 출력: 5V/2.5A;
12. 배터리: 완충 4~5 시간 소요, 최장 5 시간 연속사용 가능
13. 무게: 480g
14. 크기: 195mm*139.5mm*25mm

고객지원

(주)네오엑세스

(156-817) 서울특별시 동작구 사당로 23 길 116-8 (사당동) 2 층

Tel: 02-6959-2250 Fax: 02-6959-2270

Email: cs@neoacc.com

품질보증서

아래와 같이 보증합니다.

1. 본 제품은 엄정한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 보증기간 2년 동안은 무상 수리를 해드립니다.
3. 보증기간 이내라 하더라도 본 보증이내의 유상서비스 안내에 해당되는 경우는 서비스 요금을 받고 수리해 드립니다.
4. 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시해 주십시오.
5. 보증서는 재 발행치 않으므로 소중히 보관하십시오

제 품 명	스노우 7 HD	보증기간	
모 델 명	EM-RV7V	24개월	
제조번호			
판매일자	년 월 일	년 월 일까지	
구입자 주소			
성 명		전화	

(주) 네 오 엑 세 스

본사: 서울특별시 동작구 사당로23길 116-8 2층(사당동,대원빌딩)

☎ 02-6959-2250 / FAX 02-6959-2270